

Instrukcja kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu za pomocą testów biologicznych (Sporal A)

1. Opakowanie ze Sporalem A umieścić wśród pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.
UWAGA! Nie wyjmować testu z opakowania papierowo-foliowego.
2. Przeprowadzić sterylizację w zwalidowanych warunkach, parametry procesu należy podać na zleceniu (temperatura, ciśnienie pary wodnej, czas).
3. Sporal A dostarczyć do badania w ciągu 24 h, w godz. od 7.00 do 14.00, do tego czasu przechowywać w temp. pokojowej w suchym miejscu.
4. Jeśli testy nie zostały zakupione w naszym Laboratorium, należy dla danej serii produktu dostarczyć do badania jeden wskaźnik kontrolny (który nie przeszedł cyklu sterylizacji)
5. Odczyt wyniku następuje po 7 dniach.