

**Instrukcja kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu
za pomocą testów biologicznych (Sporal A)**

1. Opakowanie ze Sporalem A umieścić wśród pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku, w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.
UWAGA! Nie wyjmować testu z opakowania papierowo-foliowego.
2. Przeprowadzić sterylizację w zwalidowanych warunkach, **parametry procesu** (temperatura, ciśnienie pary wodnej, czas) oraz **datę sterylizacji** należy podać na zleceniu.
3. Sporal A dostarczyć do badania **w ciągu do 72 godz.**, w godz. **od 7.00 do 14.00**, do tego czasu przechowywać w temp. pokojowej w suchym miejscu.
4. Jeśli testy nie zostały zakupione w naszym Laboratorium, należy dla danej serii produktu dostarczyć do badania jeden wskaźnik kontrolny (który nie przeszedł cyklu sterylizacji)
5. Odczyt wyniku następuje po 24 godzinach inkubacji.